

Teken kunnen naast de ziekte van Lyme ook andere ziekten overbrengen zoals Q-koorts. Het is daarom belangrijk de teek bij het verwijderen niet te beschadigen, omdat er anders geïnfecteerd materiaal in de huid kan komen.

De TICKED OFF™ / TEEKWEG® TEKENLEPEL


kan in elke richting naar de teek toe worden gebruikt: van de voorkant, van de achterkant en van de zijkant.

Zorg dat de teek goed bereikbaar is en plaats het brede deel van de V-inkeping op de huid zo dicht mogelijk bij de teek. Met een lichte druk op de huid wordt de Tekenlepel richting de teek bewogen, zodat het smalle deel van de inkeping de teek omsluit.



Een gelijkmatige voorwaartse schuifbeweging verwijdert de teek (zie afbeelding).

Niet wrikken, draaien of omhoog bewegen, alleen voorwaarts schuiven: beslist NIET draaien bij het verwijderen van de teek! De teek kan nu veilig weggegooid worden (of bewaard worden voor onderzoek). Behandel het bijtondje indien nodig. Ontsmet de Tekenlepel met alcohol of ander desinfectiemiddel of met kokend water. Gebruik door volwassenen of onder toezicht van volwassenen; het is geen speelgoed.

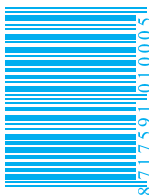

www.teekweg.nl

TICKED OFF™ Worldwide patent nr. 5595569



TEKENLEPEL
de meest praktische en
veilige manier om een
TEEK te verwijderen
bij mens en dier

www.teekweg.nl

**TICKED
OFF**TM

The Original



GEBRUIKSAANWIJZING EN INFO
ZIE BINNEN EN ACHTERZIJDE



TEKENLEPEL

De meest praktische en veilige manier om een teek te verwijderen!

- Teken kunnen naast de ziekte van Lyme ook andere ziekten overbrengen zoals Q-koorts. Het is daarom belangrijk de teek bij het verwijderen **niet te beschadigen**, omdat er anders geïnficeerd materiaal in de huid kan komen.
- Met de Teekweg Tekenlepel (= de originele TICKED OFF™) wordt de teek niet samengeknepen, zoals wel het geval kan zijn bij gebruik van bijvoorbeeld een pincet.
- Door de bolle vorm van de Tekenlepel kan men een teek ook zelf gemakkelijk uit moeilijk bereikbare plaatsen halen, zoals uit de lies of knieholte. Iets wat met een pincet meestal niet lukt zonder de hulp van een ander.
- De Tekenlepel is ontworpen om zonder een draaibeweging een teek volledig te verwijderen. In Nederland adviseert men nu ook om niet te draaien.
- Geschikt voor het verwijderen van kruipende en vastzittende teken.

- Geschikt voor het verwijderen van een teek bij mens en dier.
- De Tekenlepel is gemakkelijk mee te nemen (aan broekriem of sleutelbos) en kan worden gesteriliseerd in kokend water of met alcohol.



- U houdt 'zicht' op de teek en een teek is veilig te verwijderen zonder dat u daarvoor een leesbril of een loep hoeft te gebruiken.
- Door de speciale vorm heeft de Tekenlepel weinig raakvlak met de huid, zodat hij gemakkelijk over de huid schuift en waardoor een teek na verwijdering wordt 'opgevangen' in de Tekenlepel en niet wegrolt.
- Verwijdert pijnloos grote teken en ook de allerkleinste teek. Zelfs een larve van een teek (1mm) kan al de ziekte van Lyme overbrengen.
- Aanbevolen door artsen en dierenartsen en getest in een onafhankelijk universitair laboratorium.
- De TICKED OFF™ Tekenlepel is wereldwijd gepatenteerd.
- Verkrijgbaar bij apotheek, drogist, buitensportzaak, dierenwinkel, bezoekerscentra van natuurmonumenten, GGD, BHV opleidingen en via de website www.teekweg.nl